


Прибор для чистки ушей

Чистые ушки



Прибор для чистки ушей «Чистые ушки» Мягкая и тщательная чистка ушей

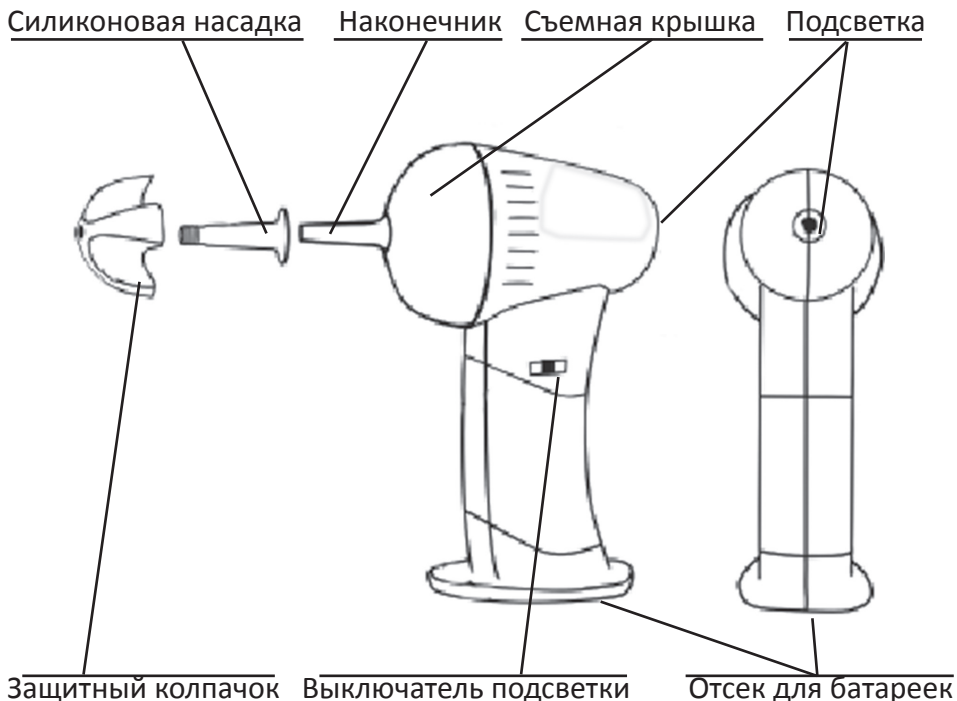

Пожалуйста, внимательно прочитайте и сохраните инструкцию. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ПО НАЗНАЧЕНИЮ. Необходимые меры предосторожности:

ВНИМАНИЕ: ЭТО НЕ ИГРУШКА. Содержит мелкие детали. Храните в недоступном для детей месте.

ВНИМАНИЕ: Не следует проводить чистку ушей при разрыве барабанной перепонки. Если вы не уверены в состоянии вашей барабанной перепонки, перед использованием данного прибора проконсультируйтесь с врачом.

ВНИМАНИЕ: Чистка должна быть безболезненной. Если во время чистки вы ощущаете боль в ухе или головокружение, остановитесь и обратитесь к врачу.


1. Если во время процедуры вы заметили болевые ощущения, немедленно прекратите процедуру.
2. Процедура чистки, проводимая детям-инвалидам должна осуществляться под тщательным наблюдением.

3. Не погружайте прибор в воду.
4. Ни при каких условиях не используйте прибор в автомобиле во время движения.
5. Используйте прибор строго по назначению, как описано в данной инструкции. Не используйте детали, не одобренные производителем.
6. Никогда не пользуйтесь прибором, если он работает неправильно, после падения или повреждения прибора, или после падения прибора в воду.
7. Следите за тем, чтобы посторонние предметы не попали в отверстия прибора.
8. Храните прибор вдали от ванны или раковины, чтобы избежать падения в воду.

Установка батареек:

Откройте крышку отсека для батареек на нижней части рукоятки прибора, нажав на защелку.

Установите две щелочные батарейки «AA», как указано на крышке, затем закройте отсек. Для питания прибора используйте только щелочные батарейки, обращайте внимание на полярность при установке. Не используйте одновременно старые и новые батарейки или батарейки разного типа. Не оставляйте батарейки в приборе, если он не используется в течение длительного времени.

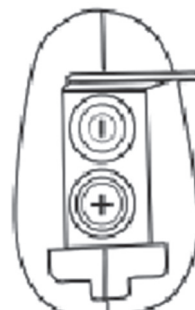

Инструкция по применению:

1. Чтобы поставить чистую силиконовую насадку, снимите защитный колпачок, с нажимом оденьте насадку на наконечник устройства. Затем снова установите защитный колпачок, зафиксировав его на насадке закручивающим движением. Будьте внимательны, не повредите силиконовую насадку.

2. Включите прибор с помощью переключателя.

3. Введите прибор в ухо. НЕ ВВОДИТЕ наконечник в ушную раковину более чем на 1/3 см. Тщательно уберите влагу/грязь с видимой поверхности внешней части ушной раковины.

ВНИМАНИЕ: Если вы слышите высокочастотный свист, снимите и выбросьте силиконовую насадку.

На случай засорения наконечника, снимите съемную крышку и промойте под струей горячей воды. Не погружайте прибор в воду.

4. Повторяйте процедуру очищения до удаления основного количества влаги/грязи.

ВНИМАНИЕ: Как правило вся процедура занимает от 30 секунд до 5 минут. Если процедура занимает больше времени, проконсультируйтесь с врачом.

5. После окончания процедуры, очистите прибор, следуя инструкциям по уходу и чистке.

Очищение и уход:

Очищайте прибор после каждого использования, следуя инструкциям ниже.

1. Разберите прибор: снимите защитный колпачок и стяните силиконовую насадку. Открутите съемную крышку.

ВНИМАНИЕ: При первом откручивании крышки может понадобиться усилие.

2. **ВЫМОЙТЕ НАСАДКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.**

Перед каждым использованием проведите гигиеническое очищение насадок и дайте им высохнуть, **ИЛИ** очистите насадки этиловым спиртом (медицинским спиртом), **ИЛИ** прокипятите их в воде 5-10 минут. Будьте **ОСТОРОЖНЫ** с кипящими жидкостями. Храните прибор в чистом месте.

3. Перед тем как приступить к чистке прибора, убедитесь, что отсек для батареек плотно закрыт.

Протрите внутреннюю часть съемной крышки от воды и грязи с помощью мягкой ткани, смоченной в мыльном растворе.

4. Не погружайте прибор в воду. Промойте детали теплой водой из под крана, чтобы смыть остатки мыла и дезинфицирующего средства.

5. (По желанию). Продолжить очищение прибора можно, протерев отдельные детали бумажным полотенцем, смоченным в этиловом спирте (медицинском спирте), после чего дать им высохнуть.

Фильтр

6. Прочистите фильтр с помощью специальной щетки.

7. Поставьте на место крышку и защитный колпачок.

8. Выньте батарейки, если не планируете пользоваться прибором в течение длительного времени.

