

Носки-электроды

Носки-электроды разработаны, прежде всего, для массажа ступней. Вы можете проводить общий и расслабляющий массаж ступней благодаря возможности выбора программ в меню прибора. Носки-электроды позволяют нормализовать кровообращение. Благодаря этому уходит отечность ног, исчезает боль и тяжесть в ногах. Вы можете проводить массаж в домашних условиях.

1. Увлажните носки водой.
2. Подсоедините провод-переходник к носкам.
3. Соедините разъем провода-переходника со штекером провода, входящего в комплект массажного прибора.
Убедитесь, что провод вставлен плотно.
4. Наденьте носки.
5. Включите массажный прибор (ON). Выберите один из предложенных режимов и время работы нажатием пальца или стилусом на экран прибора. Подберите уровень мощности импульса кнопкой «+» (мощность увеличивается) или «-» (мощность уменьшается).
Начнется массаж. После окончания процедуры выключите прибор (OFF).

В комплект входят:

- Пара носок-электродов. Носки выполнены из электропроводящей ткани на основе серебряной нити.
- 2 провода-переходника с кнопочной системой крепления.

Носки-электроды предназначены для многократного использования.

Уход и обслуживание за носками-электродами:

- после каждого применения, а также перед обслуживанием носки следует отключить от аппарата;
- при загрязнении носки следует помыть в теплой воде с добавлением в воду небольшого количества нейтрального моющего средства и высушить при комнатной температуре;
- запрещается стирать носки в стиральной машине, а также с применением химических препаратов;
- хранить носки следует в сухом защищенном от прямых солнечных лучей, месте, вдали от нагревательных приборов при комнатной температуре;
- не допускается попадание воды или иной жидкости внутрь соединительных штекеров.

Не рекомендуется применять носки:

при открытых кожных повреждениях, при ожогах, отморожениях, гангрене, при наличии острых воспалительных гнойных процессов, родимых пятен, плоских бородавок.